



# Satisfacer las necesidades de los usuarios

## Philips Respironics System One REMstar

### Diseñado para satisfacer sus necesidades

Philips Respironics ha recogido opiniones de los propios usuarios para desarrollar un dispositivo que satisfice las necesidades cambiantes de la industria de las terapias del sueño. Como una extensión de la familia System One, REMstar completa dicha línea al ofrecer unas prestaciones excelentes en una unidad asequible. Ahora, la mayor parte de sus pacientes pueden beneficiarse de las prestaciones de confort reservadas para gamas superiores, como son:

- Tecnología de alivio de la presión Flex
- Humidificación mejorada con tecnología Dry Box

### Máxima sencillez

System One REMstar ofrece a los usuarios simplicidad y facilidad de uso gracias a una interfaz intuitiva basada en iconos. Philips reduce los costes a los proveedores de servicios domiciliarios gracias a una familia de dispositivos con componentes comunes a todos ellos, como filtros, tubos, humidificadores, etc.

**PHILIPS**

RESPIRONICS

# Flex y humidificación mejorada gracias a la tecnología Dry Box

La tecnología Flex de Philips Respironics se ha convertido en nuestro referente en cuanto a terapia de alivio de presión.

## Una forma más natural de respirar

El tratamiento con PAP resulta más natural con la tecnología Flex, al detectar el momento en el que el paciente está exhalando y reducir la presión en esos momentos para que la respiración resulte más natural y cómoda.

## La tecnología Dry Box mantiene el agua únicamente donde hace falta

Combinando el inteligente diseño de nuestra cámara de agua con la avanzada tecnología Dry Box, el riesgo de que entre agua en el dispositivo es casi inexistente, con lo que las devoluciones y averías por este motivo casi desaparecen. La cámara de agua se puede ladear y también poner boca abajo, incluso cuando está completamente llena \*, sin que el agua pueda entrar en el dispositivo. En caso de que llegue a salir algo de agua de la cámara, la tecnología Dry Box impide que entre en el dispositivo.

\*Llena hasta la línea indicadora FULL



### Especificaciones

Rango de presión	4 a 20 cm H <sub>2</sub> O
Alivio de la presión	0 a 3
Flex	
Tiempo de rampa	0 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos)
Presión inicial de subida	Ajustable al paciente
Dimensiones	7" largo x 5,5" ancho x 4" alto 18 cm largo x 14 cm ancho x 10 cm alto
Peso	3 lb; 1,36 kg (sin humidificador)
Filtros	Espuma y ultrafino opcional
Instalación del dispositivo	LED/teclado
Capacidad de almacenamiento	Promedios de cumplimiento de 7 y 30 días, horas totales de terapia, horas de ventilador. Memoria interna > 1 año
Medidor del cumplimiento	Detección de respiración
Compensación de altitud	Baja, media o alta
Requisitos eléctricos	100 a 240V CA, 50/60 Hz
Humidificación	Se integra con el humidificador térmico REMstar System One
Garantía	Dos años
Otros	Ajuste de presión
Compensación de fugas	Mediante algoritmo de control de la turbina

### Información para pedidos

Dispositivos	Nº de referencia	
	España	Latinoamérica
REMstar	SP171	IN171
REMstar con humidificador térmico	IN171H	IN171H
Humidificador térmico System One	IN6H	IN6H

Respironics, REMstar, System One y Flex son marcas comerciales de Koninklijke Philips Electronics N.V. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos

Visítenos en [www.philips.com/systemone](http://www.philips.com/systemone)



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy NB 3/8/13 MCI 4105017 PN 1102073

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics  
Philips Respironics Sede Internacional

+33 1 47 28 30 82  
Philips Respironics Asia Pacífico  
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia  
+61 (2) 9947 0440  
1300 766 488 (toll free, Australia only)  
Philips Respironics UK  
+44 800 1300 845

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)